

TULGRASUM

10 VENDAJES



APÓSITO ESTÉRIL NO ADHESIVO
ÁCIDO HIALURÓNICO Y CARNOSINA

DESCRIPCIÓN

TULGRASUM es un apósito estéril no adhesivo, listo para su uso, presentado en sobres únicos. La venda es de algodón hidrófilo y está humedecida en modo uniforme con una crema que contiene ácido hialurónico de alto peso molecular y carnosina.

INDICACIONES

TULGRASUM es un producto sanitario que debe ser aplicado sobre la piel lesionada y está indicado en el tratamiento de las lesiones de la piel y/o la dermis superficial como abrasiones, cortes, heridas cutáneas, quemaduras, úlceras de tipo diabético y úlceras de decúbito.

TULGRASUM se tolera bien por la piel, es fácil de aplicar y adaptable.

MODO DE EMPLEO

Antes de su aplicación se debe limpiar la zona afectada. Sacar el apósito de su envase y aplicarlo sobre el área afectada en contacto directo con la superficie de la lesión.

Si es necesario se puede cubrir con un vendaje secundario absorbente y se puede fijar con vendas u otros vendajes.

El apósito debe cambiarse cada 6/12 horas, la frecuencia de cambio dependerá de la condición clínica de la lesión cutánea y del protocolo clínico indicado por el médico.

CARACTERÍSTICAS

TULGRASUM es un producto sanitario estéril que protege la lesión del medio exterior, garantizando la hidratación correcta y la elasticidad de la piel.

TULGRASUM favorece el proceso de curación natural mediante la protección y el control del microambiente de la herida, reduce el riesgo de infecciones por agentes externos y contribuye a mantener valores óptimos de pH para favorecer la epitelización.

COMPOSICIÓN

Agua, parafina blanda blanca, aceite de vaselina, alcohol cetostearílico, cetomacrogol 1000, sorbato de potasio, dihidrógeno fosfato sódico, ácido láctico, hialuronato sódico y carnosina.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS

TULGRASUM no puede ser utilizado en caso de hipersensibilidad conocida a cualquier componente de la formulación del producto.

En casos de sensibilización el producto se debe retirar inmediatamente.

TULGRASUM debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

No utilizar el producto durante períodos más largos o con diferentes usos de los que están indicados en este prospecto o de lo que haya indicado su médico.

No utilizar si el estuche ha sido abierto. 

No dispersar el producto en el ambiente después de su empleo.

CONSERVACIÓN

TULGRASUM debe conservarse en lugar frío y seco, a temperatura ambiente.

ADVERTENCIAS:

No usar una vez superada la fecha de caducidad que aparece en el envase.

Cada gasa es desechable y no debe ser reutilizada.



Alfakjn S.r.l. P.zza Repubblica, 22 - 27026 Garlasco (PV) - Italia

Distribuidor: Desma Laboratorio Farmacéutico SL Paseo de la Castellana 121, escalera derecha, 6ºB 28046 Madrid, España

STERILE R



PRODUCTO SANITARIO 

REF FTCE10

Rev.0 04/2017
Art.0 04/2017


Laboratorio Farmacéutico S.L.